

## Anleitung zur Probeentnahme

### Hinweis:

*Bitte lesen Sie die ganze Seite durch, bevor Sie mit der Probenentnahme beginnen. Die Probe sollte mindestens eine Stunde nach dem Essen oder Trinken entnommen werden. Vermeiden Sie es, vor der Probenentnahme warme oder heiße Flüssigkeiten zu sich zu nehmen.*

1. Öffnen Sie die Plastikverpackung der Abstrichbürste vorsichtig und mit sauberen Händen, ohne dabei das Bürstchen zu berühren. Bewahren Sie den Plastikbeutel mit Ihrer Labornummer auf, um die Sammelbehälter nach der Probenentnahme dorthin zurück zu legen.
2. Streichen Sie mit dem Bürstchen mehrmals kräftig an der Innenseite der Wange entlang (ca. 60 Sekunden). Durch ordentliches Streichen erzielen Sie eine gute Probe! Durch zaghaftes Streichen wird weniger DNA gewonnen, was unter Umständen zu einer mehrwöchigen Verzögerung der Auswertung führen kann.
3. Nehmen Sie einen Sammelbehälter mit Ihrer Labornummer. Schrauben Sie den Deckel ab. Halten Sie das Bürstchen in den Sammelbehälter und drücken Sie auf das obere Ende des Bürstengriffs, wodurch das Bürstchen genau unter die Seifenlösung des Sammelbehälters fällt. (Bitte drücken Sie das Bürstchen nicht bis zum Boden des Röhrchens - dadurch lässt es sich nur schwer wieder herausholen.)
4. Entfernen Sie den Bürstengriff, so dass die Bürstchenspitze im Röhrchen zurückbleibt. Schrauben Sie den Deckel auf dem Sammelbehälter fest. Der Sammelbehälter muss fest verschlossen sein, um die Qualität der Probe zu gewährleisten. Der Sammelbehälter mit der Bürstchenspitze darin sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Die Proben werden jedoch durch winterliche oder sommerliche Temperaturen nicht beeinträchtigt, wenn sie mit der regulären Post verschickt werden.
5. Warten Sie 8 Stunden und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mit dem zweiten und dritten Bürstchen und Sammelbehälter mit Ihrer Labornummer.
6. Legen Sie die Sammelbehälter in den Plastikbeutel mit Ihrer Labornummer und verschließen Sie diesen luftdicht. Legen Sie den Plastikbeutel, die Analysevereinbarung und das Freigabeformular in den beigegefügteten Rückumschlag und schicken Sie diesen an iGENEA zurück.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Sie können uns jederzeit schreiben oder uns während der Bürozeiten anrufen. Unser Kundenservice ist in jedem Fall für Sie kostenfrei.

**iGENEA**

Gentest.ch GmbH  
Verarbeitungszentrum  
Postfach 18  
CH-8915 Hausen am Albis  
Schweiz

+41 (0)43 233 81 51

[info@igeneea.com](mailto:info@igeneea.com)

[www.igeneea.com](http://www.igeneea.com)